


**USO**  
Dispositivo medico-diagnostico in vitro, rapido, su strisce reattive, per la determinazione di adulteranti o di diluizioni (CRE+PH+ALC) su campioni di urine umane in cui sia necessario rilevare la presenza di droghe d'abuso. Costituisce un indispensabile test pre-screening, fondamentale in ogni programma di monitoraggio di sostanze stupefacenti ed alcol in campioni di urine. Il sistema è parte integrante del kit immunocromatografico **MULTI DRUG RAPID TEST PANEL (URINE)** per la determinazione qualitativa simultanea delle seguenti droghe d'abuso e metaboliti COC/AMP500/MET500/THC/MTD/MDMA/MOP/BUP.  
Una concentrazione di alcol inferiore a 200 ug/ml (0.02%) non produce alcuna colorazione nella zona di reazione ALC (campione negativo), mentre il superamento della soglia di sensibilità (cut-off) ovvero > 200 ug/ml produce una colorazione in verde o in gradazioni celeste della zona di reazione ALC, indicando un risultato positivo per la presenza di alcol nel campione di urine. Inoltre il test deve essere considerato **NON VALIDO** quando si colorano soltanto i bordi della zona di reazione: ciò può essere provocato da un insufficiente campionamento e, pertanto, il test dovrà essere ripetuto


**1** Posizionare il dispositivo (CUP) su una superficie piana, inserire la chiavetta e premerla in sede

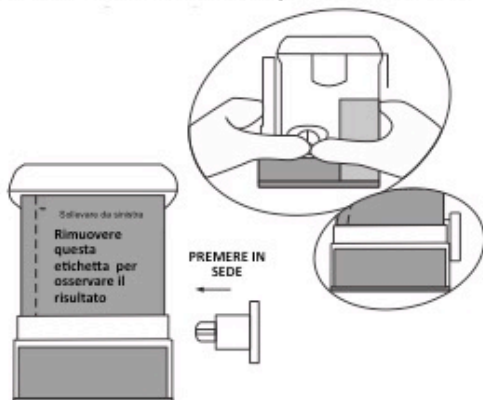

**2** Rimuovere l'etichetta autoadesiva per osservare il risultato



**3** Attendere 5 minuti e quindi registrare il risultato

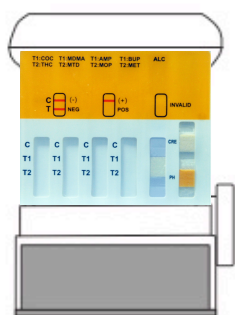

1 2 3 4 5 6  
T1:COC T1:MDMA T1:AMP T1:BUP ALC CRE  
T2:THC T2:MTD T2:MOP T2:MET pH

**Interpretare il risultato della zona reattiva ALCOL (ALC) tra 3 e 5 minuti. Fare riferimento alla carta cromatica inclusa**

**4** Interpretare il risultato delle zone reattive adulteranti (CRE e pH) tra 3 e 5 minuti. Fare riferimento alla carta cromatica inclusa



**Interpretare il risultato a 5 minuti**

**INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI**



**NEGATIVO POSITIVO NON VALIDO**

**Indice dei Simboli**

	Attenzione, seguire le istruzioni per l'uso		Tests per kit		Rappresentante Autorizzato
	Per uso esclusivo "in vitro"		Utilizzare entro		Non riutilizzare
	Conservare a 2-30°C		Numero di Lotto		N. Catalogo #
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata				

Codici di Riordino: **DOA184C-AD Multi-Line Rapid Test CUP (Urine)**

**10 TEST**



Bio Plastic Sas – 00100 Roma

DOA 184C-AD Rev.3.0 2018