



SCHEMA PRODOTTO



love ♥

**Etilometro monouso
ALCOHOLTEST**

'Love' Alcoltest Monouso Analisi su espirato - a fiala senza palloncino

Il Test rappresenta una soluzione pratica e affidabile per monitorare il livello di alcool nel sangue. Questo dispositivo di qualità include una fiala con un reagente chimico, comodamente confezionata singolarmente per assicurare igiene e sicurezza. Facilissimo da usare: basta soffiare nella fiala e osservare il cambiamento di colore del reagente, che indica in maniera immediata e precisa il livello di alcol. la propria sicurezza e quella degli altri.

Dettagli e Specifiche del Prodotto

Descrizione

Alcoltest monouso in busta, confezione singola Tasso: 0,00-0,20-0,50-0,80 g/l.

Contenuto

- Test reattivo in fiala
- Imbustato singolarmente.

Validità : 20 mesi, la data limite di scadenza è riportata sulla confezione.

Stoccaggio : Evitare uno stoccaggio prolungato a più di 40°C.

MODALITA' DI UTILIZZO:



Rompere la pellicola protettiva premendo tappi di protezione su entrambi i lati dell'etilometro fino alla rottura della pellicola di protezione



Fare un respiro profondo e soffiare nel boccaglio in conformità con le frecce sull'etilometro. L'aria deve essere espirata due volte per circa 10 secondi. Non interrompere il ciclo di espirazione. Assicurarsi che l'aria sta uscendo dall'altra parte dell'etilometro



Leggere i risultati del test dopo 2 minuti, ma entro 5 minuti dal test, confrontando il colore del reagente con la scala graduata.